

Manual
de utilizare
AP-001

Frellux



Bine ați venit în familia dispozitivelor Zepter pentru un stil de viață sănătos, create în jurul filosofiei emblematice: O viață mai bună.
O viață îndelungată.

Vă mulțumim pentru că ați ales Zepter Frellux™, un dispozitiv portabil compact ce combină într-un mod unic beneficiile Hiperluminii cu cele ale stimulării cu microcurenți într-un design ușor de folosit. Frellux™ este destinat acelor momente cotidiene marcate de tensiune musculară, senzații de durere și oboseală tisulară, oferind o experiență personalizată oricând și oriunde.

Acest manual vă va prezenta funcțiile aparatului, cum să îl utilizați în siguranță și cum îl puteți folosi zilnic.



Manual de utilizare

Cuprins

1.	Descrierea și scopul produsului	4
2.	Instrucțiuni de siguranță	4
3.	Caracteristicile produsului	7
4.	Conținutul pachetului	8
5.	Mod de utilizare	8
5.1	Pornirea dispozitivului	8
5.2	Selectarea programelor	9
6.	Comutarea dispozitivului în modul pauză	11
7.	Dezactivarea pauzei	11
8.	Finalizarea unui ciclu de funcționare a dispozitivului	12
9.	Oprirea dispozitivului	12
10.	Încărcarea bateriei	12
10.1	Indicarea bateriei descărcate	12
10.2	Încărcarea bateriei	13
10.3	Încărcarea bateriei în timpul funcționării	13
11.	Curățare și întreținere	13
12.	Date tehnice	14
13.	Descrierea simbolurilor utilizate	15
14.	Ghid de depanare	16
15.	Garanție	17
16.	Eliminarea dispozitivului	17
16.1	Eliminarea bateriilor uzate	17
16.2	Eliminarea dispozitivului	18
16.3	Eliminarea ambajajului	18
17.	Declarație de conformitate	18

1. Descrierea și scopul dispozitivului

Frellux™ este un dispozitiv portabil inovator și unic, care combină hiperlumina roșie (620-640 nm) cu electrostimularea, frecvent utilizată pentru ameliorarea disconfortului cauzat de durere, reducerea tensiunii musculare și combaterea semnelor de îmbătrânire. Dispozitivul este prevăzut cu 5 programe de frecvență cu hiperlumină concepute pentru a livra un spectru de energie progresiv – de la modurile „calde” cu frecvență joasă pentru un efect calmant, la modurile „reci” de înaltă frecvență potrivite pentru calmarea zonelor dureroase sau iritate. Acest lucru le permite utilizatorilor să selecteze programul cel mai confortabil și eficient pentru tratarea afecțiunilor specifice. Cu 19 niveluri de intensitate cu microcurenți ajustabile, Frellux™ oferă o gamă largă de acțiuni benefice, de la hiperlumină roșie, la stimulare cu efect calmant și până la o activare mai puternică și mai profundă.

Caracteristici

- Hiperlumină roșie filtrată prin molecula Fulerena C_{60} , cu lungimi de undă cuprinse între 620 și 640 nm
- 36 de micro-ace îmbrăcate în aur pentru o stimulare delicată și uniformă
- 5 programe de frecvență cu hiperlumină
- 1-19 niveluri de energie pulsatorie
- Posibilitatea de a utiliza modurile independent sau combinat
- Design compact, ușor de transportat

2. Instrucțiuni de siguranță

Citiți înainte de utilizare și urmați cu atenție instrucțiunile de mai jos. Nerespectarea acestora poate cauza defectarea dispozitivului și vătămare corporală. Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

⚠️ AVERTISMENT! ACEST DISPOZITIV POATE FI FOLOSIT DE COPII CU VÂRSTA DE MINIM 8 ANI ȘI DE CĂTRE PERSONE CU CAPACITĂȚI FIZICE, SENZORIALE ȘI MENTALE REDUSE SAU CU LIPSĂ DE EXPERIENȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE DOAR DACĂ AU FOST INSTRUIE ÎN PREALABIL CU PRIVIRE LA UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ A DISPOZITIVULUI ȘI DACĂ AU ÎNȚELES RISCURILE IMPLICATE.
COPIII NU TREBUIE SĂ SE JOACE CU APARATUL. COPIII

TREBUIE SUPRAVEGHEAȚI ÎN TIMPUL CURĂȚĂRII ȘI ÎN-
TREȚINERII DISPOZITIVULUI.

 **AVERTISMENT!** ACEST DISPOZITIV NU TREBUIE UTILIZAT DE PERSOANE (INCLUSIV COPII) CU CAPACITĂȚI FIZICE, SENZORIALE ȘI MENTALE REDUSE SAU CU LIPSĂ DE EXPERIENȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE, CU EXCEPȚIA SITUAȚIILOR ÎN CARE AU FOST INSTRUIE ÎN PREALABIL CU PRIVIRE LA UTILIZAREA DISPOZITIVULUI DE CĂTRE PERSOANA RESPONSABILĂ PENTRU SIGURANȚA LOR.

 **AVERTISMENT!** Risc de electrocutare. Nu conectați dispozitivul la o sursă de alimentare care nu respectă parametrii specificați în acest manual (secțiunea 8). **Nu folosiți un alimentator care are carcasa defectă sau de pe care lipsește marcajul CE.**

 **AVERTISMENT!** Asigurați-vă că voltajul prizei corespunde cu voltajul de pe eticheta alimentatorului. **După ce v-ați asigurat că carcasa alimentatorului nu este deteriorată, conectați-l la o priză care este corect instalată.**

 **AVERTISMENT!** Nu utilizați dispozitivul dacă aveți mâinile ude sau într-un mediu umed (e.g. atunci când faceți baie).

 **AVERTISMENT!** Dispozitivul și alimentatorul nu trebuie scufundate în apă, stropite sau spălate la mașina de spălat vase.

 **AVERTISMENT!** Utilizarea funcției de electrostimulare în zona capului, a gâtului sau a inimii trebuie făcută cu grijă și doar dacă v-ați familiarizat cu modul corect de aplicare. Consultați medicul specialist înainte de utilizare. Această precauție se aplică exclusiv funcției de electrostimulare a dispozitivului.

 **AVERTISMENT!** Dispozitivul emite hiperlumină roșie. Evitați contactul direct cu ochii în timpul utilizării dispozitivului. Nu priviți direct în dispozitiv atunci când sursa de hiperlumină este pornită.

 **AVERTISMENT!** Orice lichid sau corp străin care pătrunde în carcasa dispozitivului îi poate compromite funcționalitatea și siguranța. Dacă acest lucru se întâmplă, opriți imediat dispozitivul și predați-l unui centru de reparații autorizat pentru inspecție.

⚠️ AVERTISMENT! Înainte de curățare, opriți dispozitivul și scoateți alimentatorul din priză. Folosiți o lavetă moale și umedă pentru curățarea suprafețelor exterioare. Nu permiteți pătrunderea lichidelor în nicio deschidere sau în porturile USB/de alimentare. Nu utilizați alcool, solvenți, produse de curățare abrazive sau detergenți sub formă de spray direct pe dispozitiv.

⚠️ AVERTISMENT! Nu folosiți dispozitivul dacă cablul de alimentare, carcasa, acele, diodele LED sau orice alte componente prezintă semne de deteriorare.

⚠️ AVERTISMENT! Nu încercați să reparați sau să modificați dispozitivul singur.

⚠️ AVERTISMENT! Pentru a încărca bateria, conectați dispozitivul la o sursă de alimentare folosind cablul USB furnizat în pachet.

⚠️ AVERTISMENT! Dispozitivul poate fi reparat doar de către un centru de reparații ZEPTER autorizat. Efectuarea de reparații neautorizate exclude răspunderea producătorului.

⚠️ AVERTISMENT! Înainte de a utiliza dispozitivul, persoanele care suferă de boli acute sau cronice trebuie să solicite sfatul medicului specialist pentru a stabili dacă acest tip de stimulare corporală este potrivită pentru ei!

⚠️ AVERTISMENT! Pentru o utilizare sigură și eficientă, dispozitivul nu trebuie folosit de către persoanele care suferă de următoarele afecțiuni sau în situații în care utilizarea dispozitivului poate prezenta un risc:

- persoane cu boli oncologice, fotoalergie sau epilepsie,
- persoane cu boli ale sistemului circulator, inclusiv boli coronariene sau tromboză,
- persoane cu implanturi electronice precum stimulatoare cardiace sau valve cardiace artificiale,
- persoane cu răni deschise, leziuni patologice ale pielii sau afecțiuni active ale pielii,
- femeile însărcinate sau care alăptează

Dacă suferiți de oricare din aceste afecțiuni, consultați medicul specialist.

⚠️ AVERTISMENT! Dispozitivul include o baterie reîncărcabilă. Nu aruncați niciodată dispozitivul sau bateria în foc și nu le expuneți la temperaturi ridicate. Acest lucru este periculos și poate provoca explozia bateriei sau eliberarea de materiale periculoase.

⚠️ AVERTISMENT! Dispozitivul generează căldură în timpul utilizării. Evitați așezarea acestuia pe suprafețe sensibile la căldură și manevrați-l cu grijă după o utilizare îndelungată, întrucât anumite componente se pot încălzi.

3. Caracteristicile produsului

Vedere de sus a dispozitivului:

(1) - Capac detașabil cu lentilă fulerene

(1a) - Capac detașabil pentru ace și sursă de hiperlumină roșie



Butoane pentru controlul electrostimulării

- (2) - Butonul ☼ „pornit/oprit” al dispozitivului
- (3) - Butonul „+” pentru creșterea energiei impulsurilor pe ace
- (4) - Butonul „-” pentru reducerea energiei impulsurilor pe ace

Butoane de control pentru programele cu hiperlumină roșie

- (5) - Butonul ☼ „pornit/oprit” al programului cu hiperlumină roșie
- (6) - Butonul „+” pentru schimbarea programului cu hiperlumină roșie
- (7) - Butonul „-” pentru schimbarea programului cu hiperlumină roșie

Afișaj

- (8) - ⚡ Afișarea nivelului de intensitate al frecvenței 1-19
- (9) - ✱ Afișarea programului cu hiperlumină roșie 1-5
- (10) - 🔋 Bara de nivel al bateriei

Punct de conectare la sursa de alimentare

- (11) - Mufă USB tip C pentru conectarea la sursa de alimentare

4. Conținutul pachetului

- Dispozitiv Frellux
- Cablu USB
- Manual de utilizare
- Certificat de garanție
- Husă

5. Mod de utilizare

ATENȚIE: Înainte de aplicare, utilizatorul trebuie să citească cu atenție secțiunea 2 din acest manual și să respecte măsurile de siguranță indicate.

ATENȚIE: După despachetarea dispozitivului și de fiecare dată după o perioadă îndelungată în care dispozitivul nu a fost utilizat, conectați sursa de alimentare timp de 5 ore pentru a încărca complet bateria.

5.1 Pornirea dispozitivului

Țineți apăsat butonul ☼ (2) timp de minim 3 secunde până auziți un scurt semnal sonor.

Bara nivelului de încărcare a bateriei (10) va afișa nivelul de

încărcare al bateriei timp de 2 secunde – numărul punctelor luminate este proporțional cu nivelul de încărcare al bateriei. Afișajul nivelului de energie al impulsurilor de pe ace **(8)** va afișa apoi cifra „0”, indicând faptul că dispozitivul este gata de funcționare. Dacă în decurs de 1 minut nu se apasă niciun buton, dispozitivul se va opri. Acest lucru este semnalat prin două semnale sonore lungi.

5.2 Selectarea programelor

Puteți alege unul din următoarele 3 metode de funcționare ale dispozitivului:

- I. Doar electrostimulare
- II. Doar hiperlumină roșie
- III. Electrostimulare și hiperlumină roșie

Aplicarea hiperluminii roșii:

Programele 1-5 sunt concepute pentru relaxare. Utilizatorul trebuie să selecteze individual programul adecvat propriilor preferințe și nevoi.

I. Doar electrostimulare:

- a) Îndepărtați capacul detașabil pentru ace **(1a)** și capacul pentru cap **(1)**, porniți dispozitivul și începeți electrostimularea setând nivelul de intensitate la „1”.
- b) Nivelul electrostimulării poate fi modificat oricând în timpul funcționării dispozitivului prin apăsarea butoanelor „+” **(3)** și „-” **(4)**. De fiecare dată când modificați nivelul electrostimulării, numărul corespunzător nivelului setat (de la 1 la 19) este afișat în partea superioară a ecranului **(8)**. Dispozitivul este prevăzut cu 19 niveluri de energie pulsatorie.
- c) Aplicați dispozitivul pe zona corpului pe care doriți să o relaxați și mișcați-l ușor pe piele timp de 10 minute. Durata aplicării poate fi extinsă la două sesiuni (20 de minute în total), pentru a evita încălzirea zonei.

II. Doar hiperlumină roșie:

- a) Lăsați atașat capacul pentru un efect de relaxare mai intens.
- b) Porniți dispozitivul. Electrostimularea trebuie să fie setată la nivelul de intensitate „0”.
- c) Apăsăți butonul **(5)** timp de 3 secunde până auziți

un semnal sonor scurt pentru a porni programul cu hiperlumină roșie. Afișajul programului cu hiperlumină roșie **(9)** va arăta cifra 0, indicând că programul este gata de funcționare.

- d) Programul cu hiperlumină roșie poate fi modificat oricând prin apăsarea butoanelor „+” **(6)** și „-” **(7)**, în funcție de preferințele personale; ecranul inferior **(9)** va afișa cifre succesive de la 1 la 5, indicând programele de relaxare cu hiperlumină roșie.
- e) Programe cu hiperlumină roșie:
 - **Cifra 1** – hiperlumină roșie continuă
 - **Cifra 2** – Pulsație la 10 Hz
 - **Cifra 3** – Pulsație la 600 Hz - neutru
 - **Cifra 4** – Pulsație la 3kHz
 - **Cifra 5** – Pulsație la 8 kHz
- f) Programele 1-2 folosesc o hiperlumină roșie mai caldă, produsă prin emisie continuă sau de joasă frecvență. Programele 4-5 folosesc o hiperlumină roșie mai rece, creată prin pulsații de înaltă frecvență. Programul 3 se află la mijloc între hiperlumina caldă și cea rece.
- g) Aplicați dispozitivul în zona de pe corp pe care doriți să o relaxați și mișcați-l ușor pe piele timp de 10 minute. Durata aplicării poate fi extinsă la două sesiuni (20 de minute în total), pentru a evita încălzirea zonei.

III. Electrostimulare și hiperlumină roșie:

Folosirea hiperluminii roșii împreună cu electrostimularea creează sinergie.

- a) Începeți electrostimularea setând nivelul de intensitate la „1”. Alegeți nivelul de intensitate confortabil pentru dumneavoastră. Electrostimularea poate fi ajustată oricând în timpul aplicării prin apăsarea butoanelor butoanelor „+” **(3)** și „-” **(4)**.
- b) Selectați programul cu hiperlumină roșie în funcție de propriile preferințe.
- c) Aplicați dispozitivul pe zona corpului pe care doriți să o relaxați și mișcați-l ușor timp de 10 minute. Durata aplicării poate fi extinsă la două sesiuni (20 de minute în total), pentru a evita încălzirea zonei.

ATENȚIE: Este posibil ca în timpul utilizării sau după să apară o ușoară roșeață pe piele, dar aceasta ar trebui să dispară după scurt timp.

6. Comutarea dispozitivului în modul pauză

Pauza poate fi activată oricând în timpul funcționării dispozitivului apăsând butonul **⏏ (2)**. Litera „P” va fi afișată în partea superioară a ecranului **(8)**, moment în care funcția de electrostimulare și cea cu hiperlumină roșie vor fi temporar oprite. Pentru reluarea funcționării, apăsați din nou butonul **(2)**. Dacă nu se apasă niciun buton, dispozitivul se va opri automat după o perioadă de timp pentru economisirea bateriei.

Când nivelul de electrostimulare este setat la 1, apăsarea butonului „-” **(4)** care ajustează nivelul de electrostimulare va comuta dispozitivul în modul pauză.

7. Dezactivarea pauzei

Modul Pauză poate fi dezactivat apăsând scurt unul din următoarele butoane:

- a) **⏏ (2)**. Dispozitivul va relua funcționarea. Litera „P” dispare de pe afișajul superior **(8)** și este înlocuită de ultimul nivel de energie al impulsurilor de pe ace. Dacă programul de relaxare cu hiperlumină roșie a fost selectat în prealabil, acesta va fi, de asemenea, reluat.
- b) „+” la nivelul de energie al impulsurilor de pe ace **(3)** dacă Pauza a fost activată prin trecerea de la programul 1 la programul 0 al energiei impulsurilor de pe ace. Dispozitivul va relua funcționarea. Litera „P” va dispărea de pe afișajul superior **(8)** și va fi înlocuită de cifra 1, indicând nivelul de energie al impulsurilor de pe ace. Dacă programul de relaxare cu hiperlumină roșie a fost selectat în prealabil, acesta va fi, de asemenea, reluat.

În modul Pauză, dispozitivul poate fi oprit ținând apăsat butonul **⏏ (2)** timp de 3 secunde sau fără să se apese niciun buton timp de 1 minut.

8. Finalizarea unui ciclu de funcționare a dispozitivului

O singură sesiune durează 10 minute, iar finalul acesteia este marcat de un semnal sonor lung. La finalul sesiunii, nivelul de electrostimulare setat anterior și al programului cu hiperlumină roșie (dacă a fost activată) vor clipi pe afișaje.

După încheierea primei sesiuni, o a doua sesiune de stimulare poate fi începută la distanță de 1 minut.

Pentru a începe a doua sesiune apăsați butonul „+” (3) pentru a reactiva nivelul de electrostimulare și programul cu hiperlumină roșie.

După finalizarea a două sesiuni, fiecare cu o durată de câte 10 minute (în total 20 de minute), dispozitivul intră în modul hibernare timp de 3 minute. În acest moment, afișajul superior (8) va arăta litera „H”. După încheierea perioadei de hibernare, afișajul va arăta cifra „0”, indicând că dispozitivul este gata de funcționare.

Dacă dispozitivul rămâne inactiv după hibernare, se va opri automat după 1 minut pentru conservarea bateriei.

9. Oprirea dispozitivului

Dispozitivul poate fi oprit oricând ținând apăsat butonul  (2) timp de cel puțin 3 secunde, până auziți 2 semnale sonore scurte. Această acțiune va dezactiva atât funcția de electrostimulare, cât și cea cu hiperlumină roșie. Odată oprit, toate cifrele de pe afișaj se vor stinge, acest lucru indicând că dispozitivul nu mai este operațional.

10. Încărcarea bateriei

10.1 Indicarea bateriei descărcate

O baterie descărcată este indicată de clipirea lentă a primului punct de pe bara de nivel a bateriei (10). Când acest lucru se întâmplă, dispozitivul trebuie conectat la o sursă de alimentare pentru încărcare.

Dacă primul punct de pe bara de nivel a bateriei este aprins constant, acest lucru indică faptul că bateria este complet descărcată. În acest caz dispozitivul trebuie conectat imediat la o sursă de alimentare pentru a evita oprirea automată.

10.2 Încărcarea bateriei

Încărcarea bateriei începe atunci când cablul USB al alimentatorului este conectat la mufa dispozitivului (11) și când alimentatorul este apoi conectat la priză.

Punctele de pe bara de nivel a bateriei (10) se vor aprinde pe măsură ce bateria se încarcă.

Atunci când bateria este complet încărcată, ultimul punct de pe bara de nivel a bateriei (10) se va aprinde și va rămâne aprins până când alimentatorul este deconectat de la priză.

Dispozitivul poate fi folosit pe durata încărcării. El poate fi pornit ținând apăsat butonul ϕ (2) timp de 3 secunde.

- **Durata de încărcare**
~ 3 ore
- **Durata totală de funcționare după încărcarea bateriei**
8 cicluri 2x10 min., cu o pauză de 3 minute

10.3 Încărcarea bateriei în timpul funcționării dispozitivului

Puteți începe încărcarea bateriei în orice moment. Acest proces nu va întrerupe programul de stimulare selectat. Indicația de pe bara de nivel a bateriei (10) este identică cu cea din secțiunea 10.2.

11. Curățare și întreținere

Opriți și scoateți dispozitivul din priză. Apoi ștergeți-l cu o lavetă moale, curată și umedă.

Este recomandat ca după fiecare utilizare să dezinfecțați acele cu o soluție dezinfectantă pentru uz general.

 **AVERTISMENT!** Nu scufundați dispozitivul în apă și nu îl spălați sub jetul de apă. Nu folosiți detergenți abrazivi, lavete sau agenți de curățare care conțin clor.

12. Date tehnice

1. Producător

ZEPTER INTERNATIONAL POLAND Sp. z o.o.,
Domaniewska 37, 02-672 Varşovia, Polonia

2. Centru de reparații

ZEPTER INTERNAȚIONAL ROMÂNIA IMPORT
EXPORT SRL, Bd. Unirii, Nr. 70, Bl. J4-J5, 030836,
Sector 3, București

3. Parametrii necesari pentru sursa de alimentare (nu este inclusă nicio sursă de alimentare)

- Mufă USB-A
- Tensiune de ieșire 5,0 V CC
- Curent de ieșire minim 1,1 A
- Sursă de alimentare cu marcaj CE, conformă cu reglementările UE

4. Frellux

- Temperatura de funcționare a dispozitivului și de încărcare a bateriei
+10°C - +30°C
- Temperatura de transport și de depozitare până la 3 luni
-10°C - +40°C
- Nivelul de umiditate în timpul depozitării și utilizării
< 75%

Tipul bateriei

Li-Ion poli NCM 102540 3,7 V 1100 mAh

- Energie pulsatorie la o sarcină de 500 Ohm
< 300 mJ

Lungimea de undă a sursei de hiperlumină roșie

640±30 nm

- Parametrii impulsurilor cu hiperlumină roșie

durata impulsului / intervalul / repetabilitatea

- Programul 1 lumină continuă
- Programul 2 0,05 s/ 0,05 s/ 100%
- Programul 3 $0,833 \cdot 10^{-3}$ s/ $0,833 \cdot 10^{-3}$ s/ 100%
- Programul 4 $0,166 \cdot 10^{-3}$ s/ $0,166 \cdot 10^{-3}$ s/ 100%
- Programul 5 $0,0625 \cdot 10^{-3}$ s/ $0,0625 \cdot 10^{-3}$ s/ 100%

- Greutate fără ambalaj:
Frellux 170 g +/- 10 g
- Țara de origine:
Polonia
- Produsul respectă următoarele norme:
EN 60335-1
EN 62233
EN 62471
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

13. Descrierea simbolurilor utilizate



Manual de utilizare



Citiți manualul de utilizare



Pentru utilizare în interior



Este interzisă aruncarea unui dispozitiv uzat la gunoiul menajer. Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere.



Dispozitivul conține o baterie Li-poli și nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite.



Produsul respectă cerințele directivei UE.



Marcajul EAC înseamnă că produsul respectă standardele aplicabile, a trecut toate procedurile de evaluare a conformității ale Uniunii Vamale Eurasiatice și este autorizat pentru comercializare în țările Uniunii Vamale.



Avertisment

14. Ghid de depanare

Defecțiune	Cauză posibilă	Soluții
Niciun răspuns după apăsarea butonului  – dispozitivul nu poate fi pornit	Baterie descărcată	Conectați dispozitivul la o sursă de alimentare cu parametrii specificați în acest manual și încărcați bateria
Dispozitivul nu răspunde când este conectat la sursa de alimentare	- Lipsă tensiune la priza de rețea - Cablul de alimentare USB nu este conectat corect - Sursa de alimentare nu este potrivită	- Conectați un alimentator cu parametrii specificați în acest manual la o priză de rețea funcțională - Deconectați cablul USB de la dispozitiv și de la alimentator și reconectați-l strâns

Dacă soluțiile de mai sus nu sunt eficiente, deconectați alimentatorul de la rețea și duceți setul complet la centrul de reparații.

15. Garanție

Garanția este valabilă timp de **2 ani** de la data achiziției indicată pe factura emisă de vânzător la momentul livrării.

Condițiile detaliate ale garanției sunt stabilite în certificatul de garanție înmănat Clientului împreună cu produsul și factura de achiziție.

Garanția nu afectează drepturile clientului în temeiul legislației naționale sau drepturile clientului în temeiul contractului de vânzare.

16. Eliminarea dispozitivului

Următoarele informații privind mediul se aplică în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme de colectare selectivă a deșeurilor.

Ambalajul și carcasa dispozitivului, precum și manualul de utilizare și certificatul de garanție sunt reciclabile.

16.1 Eliminarea bateriilor uzate



Acest produs conține o baterie reîncărcabilă. Acest simbol indică faptul că bateria nu trebuie eliminată împreună cu deșeurile menajere. În schimb, ea trebuie dusă la un punct de colectare adecvat pentru reciclare.

Bateria nu conține cantități excesive de mercur și cadmiu, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2023/1542 al Parlamentului European și al Consiliului.

Pentru siguranța dumneavoastră, nu scoateți bateria din produs. Pentru acest lucru contactați întotdeauna un atelier de reparații autorizat Zepter.

Înlocuirea bateriei trebuie efectuată de către un atelier de reparații autorizat Zepter; înlocuirea bateriei de către de către utilizator nu este permisă.



AVERTISMENT! Nu aruncați niciodată o baterie în foc. Acest lucru este foarte periculos și interzis deoarece poate provoca o explozie.

16.2 Eliminarea dispozitivului



Acest simbol indică faptul că în Uniunea Europeană produsul trebuie eliminat la un punct de colectare separată a deșeurilor. Acest lucru se aplică produsului și tuturor accesoriilor marcate cu acest simbol. Produsele marcate ca atare nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite; în schimb, acestea trebuie duse la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

16.3 Ambalaj



Dacă doriți să eliminați ambalajul, asigurați-vă că respectați reglementările de mediu aplicabile în țara dumneavoastră.

17. Declarație de conformitate



Frellux™ respectă următoarele directive europene: CEM (Directiva 2014/30/UE), ROHS (Directiva 2011/65/UE împreună cu Directiva 2015/863/UE de modificare a Anexei II), DEEE (Directiva 2012/19/UE).

Declarația de conformitate CE garantează că dispozitivul este sigur, a fost verificat și testat și îndeplinește toate cerințele stabilite în standardele, directivele și reglementările aplicabile.

Frellux

Manual de utilizare

AP-001



www.zepter.ro

Zepter Internațional România Import Export SRL

Bd. Unirii, Nr. 70, Bl. J4-J5

030836, Sector 3

București, România